

Weiton®-Alginatlöser

Verarbeitungsanleitung

Konzentrat, 1 : 10 verdünnbar



Johannes | **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Material/ Indikation

Zur selbsttätigen Reinigung mit Korrosionsschutz von Abdrucklöffeln, Anrührbechern und Instrumenten.

Mischungsverhältnis

Pur oder mit Wasser bis max. 1 : 10

Anwendung

Schnellere Alginatauflösung durch Erwärmung auf ca. 40 °C Löffel in Lösung legen bis Reste sich durch Bürsten leicht lösen. Je nach Alginatsorte zwischen 30 und 100 Minuten. Löffel anschließend mit Wasser abspülen.

Lieferform

Flasche mit 1000 ml oder Kanister mit 5000 ml Inhalt.

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de.

Hersteller Hinweis

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

Kontakt

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

**Johannes I Weithas
dental-kunststoffe • zähne**

Johannes Weithas KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de