
Weitur[®]-KFO-St Farbkonzentrat

CE 0482

Verarbeitungsanleitung

Zum intensiven Einfärben der Weitur-KFO-St Flüssigkeiten



Johannes | **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Material

Weitur®-KFO-St Farbkonzentrat ist ein kaltpolymerisierender, cadmiumfreier Kunststoff auf Polymethylmethacrylat-Basis in Monomer-Form.

Die Flüssigkeit ist in konzentrierter Form in den Farben Rot, Gelb, Blau und Grün lieferbar.

Indikation

Weitur®-KFO-St Farbkonzentrat dient zur intensiveren Einfärbung der Weitur®-KFO-St Flüssigkeiten für kieferorthopädische Arbeiten in der Sprüh- und Modellier-technik.

Verarbeitung

Von dem Weitur®-KFO-St Farbkonzentrat werden einige Tropfen, je nach gewünschter Farbintensität, in die Flüssigkeit der Standardfarben oder auch der Intensivfarben gegeben.

Anschließend kann wie gewohnt in der Sprüh- oder Modellier-technik gearbeitet werden.

Hinweis: Die Intensivfarbe Kristall-Klar 924 ist nicht mit Farbkonzentraten zu mischen!

Lieferform

Weitur®-KFO-St Farbkonzentrat wird in 50 ml braunen Glasflaschen mit Tropfverschluss in den Farben Rot, Gelb, Blau und Grün geliefert.

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise

(Das Monomer enthält Methylmethacrylat)

- Leicht entzündlich.
- Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
- Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Von Zündquellen fernhalten.
- Nicht rauchen.
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de.

Hersteller Hinweis

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu

prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

Kontakt

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Johannes I Weithas
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de