

---

# Weiton®-Prothesenreiniger

## Verarbeitungsanleitung

---

Konzentrierter Prothesenreiniger auf Säurebasis



Johannes | **Weithas**  
dental-kunststoffe • zähne

**Material/ Indikation**

Weiton®-Prothesenreiniger ist ein Reiniger auf Säurebasis. Er entfernt Zemente, Zahnstein, Löt-rückstände, Blut- und Gewebereste.

**Mischungsverhältnis**

Mischung mit Wasser 1 : 1	langsame Wirkung
Mischung pur	schnelle Wirkung

**Verarbeitungsanweisung**

Glasgefäß mit Deckel verwenden. Die zu reinigende Prothese in das Glas legen und anschließend mit Weiton®-Prothesenreiniger bedecken. Glasgefäß mit Deckel verschließen damit keine aggressiven Dämpfe austreten.

**Reinigungszeit**

ohne Ultraschall ca. 10 Minuten  
mit Ultraschall ca. 4 Minuten  
(nicht bei Keramikzähnen verwenden)

Nach Beendigung der Reinigung die Prothese mit einer Pinzette herausnehmen unter fließendem Wasser gut abspülen. Keinen Weiton-Prothesenreiniger auf das Ultraschallgerät oder andere Metalle gelangen lassen (Rostgefahr).

**Hinweis**

Keine Retentionseinsätze/Friktionsringe verschiedener Verankerungssysteme der Implantattechnik mit Weiton-Prothesenreiniger reinigen, weil diese aufgelöst werden können.

**Entsorgung**

Weiton-Prothesenreiniger mit viel Wasser verdünnen und über den Abfluss entsorgen.

**Lieferform**

Flasche mit 1000 ml oder Kanister mit 5000 ml Inhalt.

**Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise**

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter [www.weithas.de](http://www.weithas.de).

**Hersteller Hinweis**

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen

außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

**Kontakt**

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

**Johannes I Weithas**  
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas KG  
Gartenstraße 6  
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39  
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: [info@weithas.de](mailto:info@weithas.de)  
Internet: [www.weithas.de](http://www.weithas.de)