
Weiton[®]-Traylight

Gebrauchsanweisung

Lichtpolymerisationsgerät



Johannes | **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Gebrauchsanweisung

Weiton®-Traylightgerät ist ein UVA-Lichtgerät zur Polymerisation von lichthärtenden Löffelplatten mit einem Fassungsvermögen von 3 – 4 Modellen.

Das Gerät wird am Netzschalter, der sich an der rechten Seite der Rückwand befindet, eingeschaltet. Der Netzschalter leuchtet grün. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist die Gerätesicherung (T 1,25 A) zu überprüfen.

Das Modell wird auf den Boden der Schublade gestellt, die Schublade anschließend in das Gerät schieben und die Starttaste drücken. Die UVA Lampen beginnen zu strahlen und die Härtung beginnt. Das Härtungsende wird nach 5 Minuten erreicht. Die Lampen erlöschen dann automatisch.

Da das Licht am Löffelgriff das Material nicht immer vollständig durchdringt, empfiehlt es sich, den Abformlöffel vom Modell zu nehmen und die Rückseite ebenfalls zu härten.

Der Härtevorgang kann durch das Ausschalten des Gerätes unterbrochen werden.

Zur Reinigung und Wartung ist das Gerät vom Netz zu trennen. Der Innenraum und die Reflektorflächen können mit Alkohol gereinigt werden.

Die Lampen können einfach durch vorsichtiges Herausziehen ausgewechselt werden.

Technische Daten

Netzspannung	220-240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	40 W
Sicherung	T 1,25 A
Spektralbereich	UVA
Zeitbetrieb	5 Min.
Lampentyp	Fluoreszenzlampe mit Spezialbeschichtung, 9 W
Anzahl der Lampen	4 Stück
Standzeit der Lampen	ca. 500 Stunden

Lieferform

1 Gerät inklusive Lampen.

Kontakt

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Johannes | Weithas dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de