

---

# Weiton®-Labputty Typ A

## Verarbeitungsanleitung

---

### Knetmasse -additionsvernetzend-



Johannes | **Weithas**  
dental-kunststoffe • zähne

**Material**

Weiton®-Labputty Typ A ist ein knetbares Silikon nur für die extraorale Anwendung in der Zahntechnik, additionsvernetzend mit hoher Endhärte nach der Aushärtung von mind. Shore A 88.

Farbe: Basispaste: blau  
Katalysatorpaste: grau

**Indikation**

Weiton®-Labputty Typ A ist zu verwenden für die Herstellung von Vorwällen und Reparaturmodellen.

**Mischungsverhältnis**

1 Messlöffel Knetsilikon Basispaste  
(ca. 9 ml/16 g) und  
1 Messlöffel Knetsilikon Katalysatorpaste  
(ca. 9 ml/16 g)

**Technische Daten** (bei Raumtemperatur von  
ca. 23 °C und ca. 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Mischzeit	ca. 30 Sek.
Gesamtverarbeitungszeit	ca. 90 Sek.
Abbindezeit	ca. 6 – 7 Min.
Shore A (nach 10 Min.)	mind. 81
Endhärte Shore A	mind. 88
Haltbarkeit	mind. 24 Monate

**Lieferform**

Packung à 840 ml = 1,6 kg  
(je 1 Dose mit 0,8 kg Basis- und Katalysatorpaste)

Packung à 5270 ml = 10,0 kg  
(je 1 Eimer mit 5,0 kg Basis- und Katalysatorpaste).

**Verarbeitung**

1 Messlöffel des blauen Basismaterials wird mit 1 Messlöffel des grauen Katalysatormaterials mit den Händen vermischt. Die unterschiedlichen Farben der Massen bieten eine gute Mischkontrolle.

**Arbeits- und Sicherheitshinweise**

1. Nicht über 25 °C lagern.
2. Beim Anmischen von Hand am besten nur Handschuhe aus Vinyl, Nitril und PE verwenden oder Puder freie Latex-Handschuhe, damit das Katalysatorsystem nicht angegriffen wird.
3. Behältnisse sofort nach Gebrauch wieder verschließen.
4. Dosierlöffel und Verschlüsse nicht vertauschen.
5. Ausgießen der Abformungen nach 30 Min. möglich.
6. Die Abformungen können galvanisch verkupfert oder versilbert werden.

7. Augenkontakt vermeiden, ggf. Augen sofort mit viel klarem Wasser spülen und unverzüglich Augenarzt aufsuchen.
8. Flecken auf Kleidungsstücken vermeiden, weil vernetzte elastomere Abformmaterialien chemisch beständig sind.

**Allgemeiner Hinweis**

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials.

**Kontakt**

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

**Johannes I Weithas**  
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas KG  
Gartenstraße 6  
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39  
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: [info@weithas.de](mailto:info@weithas.de)  
Internet: [www.weithas.de](http://www.weithas.de)