
Weiton®-Labputty Typ K

Verarbeitungsanleitung

Knetbare kondensationsvernetzende Silikonmasse



Johannes | **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Material

Weiton®-Labputty Typ K basiert auf kondensationsvernetzenden Silikonen. Die Basispaste ist weiß, der Tubenhärter rot eingefärbt. Weiton®-Labputty Typ K ist ausschließlich für extraorale Anwendungen bestimmt.

Anwendungsbereich

Weiton®-Labputty Typ K ist eine knetbare Silikonmasse für die Herstellung von Vorwällen, Reparaturmodellen und Ausblockungen.

Vorteile und Eigenschaften

Weiton®-Labputty Typ K ist eine knetbare Silikonmasse mit sehr hoher Abformgenauigkeit und optischer Anmischkontrolle durch farbigen Tubenhärter. Durch die außerordentliche hohe Endhärte von Shore A 90 wird eine gute Stabilität und sichere Fixierung der künstlichen Zähne gewährleistet. Das Material ist leicht zu mischen, klebt nicht und verbindet sich auch nicht mit Gips, Wachs, Zähnen und Metall. Die Härterpaste ist DBTL (Dibutylzinndilaurat) frei.

Technische Daten (Angaben bei Raumtemperatur)

mindestens haltbar 3 Jahre	< 23 °C
Lagerung, verschlossen	< 25 °C
Mischzeit	30 Sek.
Verarbeitungsbreite inkl. Mischzeit	2 Min.
Abbindezeit inkl. Mischzeit	8 Min.
Schrumpfung nach 4 Std.	< 0,2 %
Schrumpfung nach 24 Std.	< 0,6 %
Härte Shore-A	mind. 90

Verarbeitungshinweis**a) Dosieren und Mischen**

Es werden, je nach gewünschter Menge, pro Löffel Basispaste drei Stranglängen Härterpaste vom Durchmesser des Dosierlöffels genommen. (Beim Mischen ohne Dosierlöffel werden ca. 3 % Härter benötigt.)

Beide Massen werden dann verknetet, bis die Farbe gleichmäßig wird, mindestens jedoch 30 Sekunden.

Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 2 Minuten; die Erhärtungszeit ca. 8 Minuten, jeweils bei Raumtemperatur.

b) Lagerung

Die Haltbarkeit von **Weiton®-Labputty Typ K** beträgt mindestens 3 Jahre, wenn die Lagerung bei Temperaturen unter 23 °C erfolgt. Angebrochene Dosen sollten verschlossen unter 25 °C aufbewahrt werden.

c) Lieferform

Dose mit 1,6 kg Basispaste
Eimer mit 10 kg Basispaste

Härterpaste in Tuben mit ca. 70 g (= 63 ml)

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de.

Hersteller Hinweis

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials.

Kontakt

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Johannes I Weithas
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de