
Weiton[®]- Modellierwachs Typ Spezial

Verarbeitungsanleitung

Für die Aufstellung und Ausmodellierung von Prothesen
sowie Ausmodellieren von Modellguss-Prothesen



Johannes | **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Material

Weiton-Modellierwachs Typ Spezial ist ein hochwertiges, elastisches Plattenwachs. Es besteht aus einer Komposition von Mikro-wachsen, Paraffin, natürlichen Wachsen und einem hohem Bienenwachsanteil.

Die Platten sind in zwei verschiedenen Größen

175 x 80 x 1,25 mm oder 175 x 80 x 1,5 mm
und
in Sommer- oder Winterqualität

lieferbar.

Weiton-Modellierwachse Typ Spezial weisen eine hohe Kanten- und Bruchfestigkeit sowie eine geringe thermische Kontraktion auf.

Indikation

Die Weiton-Modellierwachse Typ Spezial dienen zum Aufstellen von Zähnen und zum Ausmodellieren von Modellguss- Prothesen.

Verarbeitung

Die Wachsplatte wird durch Eintauchen in warmes Wasser oder über der Flamme eines Bunsenbrenners erwärmt. Das Aufwachsen und Modellieren des leicht verflüssigten Wachses ist mit geeigneten Instrumenten durchzuführen.

Wichtig: Nur extra-orale Anwendung!

Lieferform

Packung mit 500 g und 2500 g in Schachteln

Lagerhinweise

Trocken und in geschlossener Schachtel lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen und von Wärmequellen fernhalten.

Bei niedrigen Temperaturen von unter ca. 8° C, besteht eine erhöhte Bruchgefahr der Wachsplatten.

Haltbarkeit

Das Modellierwachs sollte nur bis max. 3 Jahre nach Herstellungsdatum verwendet werden.

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de.

Hersteller Hinweis

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

Kontakt

*Für die Beantwortung von
Fragen stehen wir Ihnen
jederzeit gern zur Verfügung.*

Johannes I Weithas
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de