
Weiton[®]- Klebewachs

Verarbeitungsanleitung

Klebewachs für das temporäre und permanente Kleben



Johannes | **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Material

Weiton-Klebewachs besteht aus einer Komposition von Mikrowachsen, Kolophonium und Polyterpenharzen.

Weiton-Klebewachs ist in zwei verschiedenen Formen lieferbar:

Rosa Stangen: L 150 mm, Ø 7 mm

Rosa Scheiben: 8 mm Stärke Ø 75mm,

Weiton-Klebewachs in Stangen und Scheiben besitzt eine sehr hohe Klebekraft.

Indikation

Das Weiton-Klebewachs ist bestimmt für Montagearbeiten, temporäre und permanente Verklebungen und Reparaturen. Es besitzt auch eine gute Adhäsion zu Metallen. Nur für den extra-oralen Gebrauch!

Verarbeitung

Das Weiton-Klebewachs wird für die überwiegenden Arbeiten mit Hilfe eines Wasserbades auf ca. 59° - 63°C Temperatur gehalten. Dann sollte wie gewohnt mit Pinsel oder Spachtel das Wachs dünn und gleichmäßig aufgetragen werden. Es kann auch mit einer Heißluftpistole gearbeitet werden, mit der auch eine sehr einfache Wachs-Entfernung möglich ist.

Lieferform

Stangen in Rosa Schachtel mit 24 Stück
Scheiben in Rosa Schachtel mit 10 Stück

Lagerhinweise

Trocken und in geschlossener Schachtel lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen und von Wärmequellen fernhalten.

Bei niedrigen Temperaturen von unter ca. 8° C, besteht eine erhöhte Bruchgefahr.

Haltbarkeit

Die Weiton-Klebewachse sollten nur bis max. 3 Jahre nach Herstellungsdatum verwendet werden.

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de.

Hersteller Hinweis

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

Kontakt

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Johannes I Weithas dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de