

Patientenname

Einsetzdatum

Zahnarzt

Val-Clean-Reiniger

Der Original-Prothesenreiniger für Ihre Valplast-Schiene

Val-Clean ist ein konzentriertes Reinigungspulver, das speziell auf die Reinigung Ihrer Valplast-Schiene abgestimmt ist. Anders als bleichmittel- oder schleifpartikelhaltige Prothesenreiniger verhindert Val-Clean ein frühzeitiges Ausbleichen oder Abstumpfen der Schiene. Val-Clean und das passende Reinigungsgerät erhalten Sie bei Ihrem Zahnarzt, Dentallabor oder direkt bei dem Valplast-Händler Johannes Weithas.



Jetzt Val-Clean bestellen!

Jetzt direkt bestellen unter
Telefon: +49 (43 81) 43 39
oder ganz einfach im Internet:
www.valclean.de



Hier erhalten Sie auch das Original-Valplast-Reinigungsgerät und die Valplast-Zahnbürste.

Dentallabor

Diese Broschüre wurde für Sie bereitgestellt durch:

Johannes | **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Gartenstraße 6
D-24321 Lütjenburg

Exklusivhändler für Valplast:
www.valplast.de

Rev.-Nr.: 01.01
Stand 03/2022

Johannes | **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Pflegehinweise

Für den Umgang mit Ihrer
Valplast®-Schiene



Sehr geehrter Patient,

wir beglückwünschen Sie zu Ihrer neuen Valplast-Aufbissschiene. Bei Valplast handelt es sich um einen neuartigen Dentalkunststoff aus Nylon.

Die besonderen Materialeigenschaften garantieren eine optimale Verträglichkeit sowie einen völlig neuen Tragekomfort, und das ganz ohne Weichmacher.

Sollten Sie ein Unwohlsein mit Ihrer Valplast-Schiene verspüren oder Fragen bezüglich der korrekten Handhabung haben, wenden Sie sich an Ihren behandelnden Zahnarzt.

Pflegehinweise für Patienten

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Valplast-Schiene haben, ist es wichtig, diese kurzen Pflegehinweise zu beachten:



- ✓ Reinigen Sie Ihre Valplast-Schiene täglich. Dazu spülen Sie Ihre Schiene ca. 30–60 Sekunden unter fließendem, warmen Wasser. Legen Sie die Valplast-Schiene für ca. 15–30 Minuten in ein Reinigungsbad mit Val-Clean®. Verwenden Sie keinesfalls handelsüblichen Prothesenreiniger.
- ✓ Wenn möglich, spülen Sie die Schiene vorher unter fließendem Wasser ab, um eventuelle Essensrückstände zu entfernen.

- ✓ Vermeiden Sie es, Ihre Valplast-Schiene mit einer Zahnbürste zu reinigen. Falls Sie die Schiene noch zusätzlich reinigen möchten, verwenden Sie ausschließlich eine Zahnbürste mit sehr weichen Silikonborsten (z.B. Zahnbürste für Babys) und Wasser.
- ✓ Bewahren Sie Ihre Schiene in einem Wasserbad auf, wenn Sie diese nicht tragen. So wird gewährleistet, dass das Material seine optimalen Eigenschaften bewahrt und nicht austrocknet.
- ✓ Bitte beachten Sie die Pflegehinweise Ihres Zahnarztes für Ihre natürlichen Zähne und Ihr Zahnfleisch.

Was Sie vermeiden sollten

- Harte Zahnbürsten sowie Zahnpasta mit Schleifpartikeln bzw. Bleichmitteln (z.B. aufhellende Zahnpasta, Raucher-Zahnpasta). Diese können zum Zerkratzen oder Stumpfwerden der Schiene führen.
- Prothesenreiniger, die Bleichmittel enthalten bzw. stark basisch oder sauer sind.
- Austrocknen der Schiene, wenn Sie diese nicht tragen.
- Allzu sorglosen Umgang mit Ihrer Schiene, auch wenn der Valplast-Kunststoff im klinischen Einsatz unzerbrechlich ist.